


ディスプレイブル採卵針


【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

【本体】

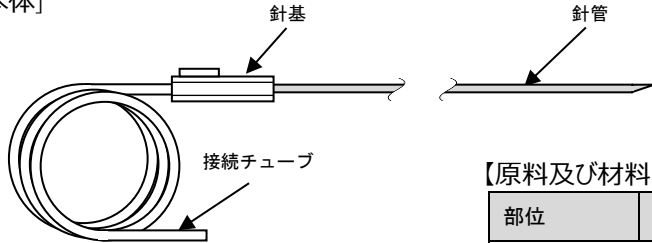

【キャップ】

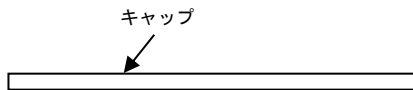


【原料及び材料】


部位	名称	原材料
本体	針管	ステンレス鋼
	針基	ABS樹脂又はポリカーボネート又はポリプロピレン
	接続チューブ	シリコーンゴム又はポリ塩化ビニル
	潤滑剤	シリコーン油
キャップ	キャップ	ポリプロピレン又はポリエチレン又はポリ塩化ビニル

【針基の形状】

Cタイプ

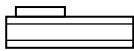

Aタイプ

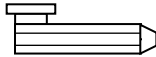

Hタイプ



【使用目的又は効果】

超音波ガイド・生体卵子吸引法に使用される処置用の器具である。

【使用方法等】

- (1) 本体の包装を開き、接続チューブを吸引用の試験管（遠沈管）に取り付ける。
- (2) 針管を保護しているキャップを外し、針基に卵子吸引用の超音波プローブをセットする。
- (3) 牛等（家畜）の膣に、針管を超音波プローブと共に挿入し、超音波画像から卵巣中の卵胞を探す。
- (4) プローブを操作して超音波画像中の卵胞へ針管の先端を挿入し、卵子を含む卵胞液を吸引する。
- (5) 接続チューブを介して、卵胞液（卵子）を試験管（遠沈管）に集める。

【使用上の注意】

- (1) 包装および製品について、破損・汚損等の異常がある場合は、使用しないこと。
- (2) 再使用禁止。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エア・ウォーター・リアライズ株式会社
 住所：茨城県笠間市長兎路 1320 番地 5
 TEL/FAX：0296-77-8649 / 0296-77-8849

【製品に関するお問い合わせ先】

エア・ウォーター・リアライズ株式会社
 電話：0120-305-765
 〈受付時間〉：9:00～17:00