




## Seringa de Transferência de Embriões de Vacas "mo-N 1"

### cow embryo transplanter ...*Mo-NO.1*





Fácil, higiênica e de baixo custo

- Conjunto de Seringas de Transferência para canudos de 0,25ml
- Sem bainha inferior
- As Seringas, os Êmbolos e as Varetas são embalados e esterilizados individualmente
- 20 Seringas, 2 Êmbolos e 2 Varetas em cada Caixa
- ★ Mangas Sanitárias pré-montadas

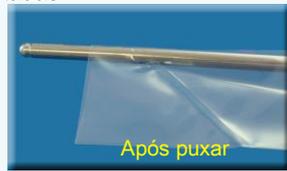

- ★ Orifícios de Saída que Abrem <-> Fecham

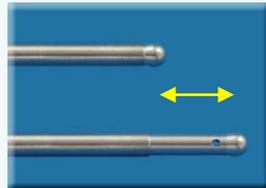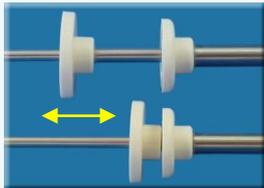

- ◎ As **Seringas de Transferência** (feitas em aço inoxidável) são muito finas (diâmetro de 3,6mm), mas muito resistentes. Você vai sentir facilidade ao inseri-la.
- ◎ Você pode abrir e fechar **os orifícios de saída**. Mantenha-os fechado até que você insira a seringa e chegue a uma profundidade suficiente. Em seguida, abra os furos e empurre um embrião. Não há risco de entupimento do orifício
- ◎ As mangas sanitárias são pré-montadas com as Seringas de Transferência. Você as retira todas juntas e inicia as operações de TE (transferência embrionária).

Para que a operação de TE **seja higiênica, efetiva e simples**, nós acordamos que a seringa de transferência fosse usada **UMA ÚNICA VEZ**.

- ◎ O custo de uma operação de TE é de aproximadamente **U\$ 9,00**. Em vez disso, você pode sempre usar uma seringa de transferência nova e, em perfeitas condições de higiene. E você está livre do trabalho de lavagem, esterilização e outras questões envolvidas no reuso.

### A preparação do "mo-N 1" é simples e tranquila

- (1) Abra uma embalagem de seringa de transferência pela extremidade da flange. Insira o canudo na seringa pela extremidade da flange.



(Você não precisa retirar a seringa da embalagem até iniciar a operação de TE)

- (2) Com o uso de uma vareta, deixe o conjunto de canudos na ponta da seringa.



- (3) Retire a vareta e coloque o êmbolo. Você está pronto para a operação de TE



- (4) Retire a seringa com a manga sanitária, e então dê início a operação de TE