



# Seringue de transfert d'embryon de vache "mo-No.1"





- Ensemble de seringue de transfert pour tubes à embryons de 0,25ml
- Concept sans gaine
- Les seringues, pistons, baguettes sont emballés et stérilisés individuellement
- 20 seringues, 2 pistons et 2 baguettes dans chaque boîte

## ★ Manchons sanitaires pré-installés



## ★ Orifices de sortie ouverts <-> fermés

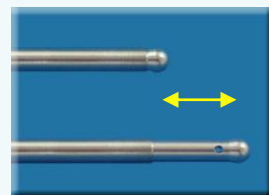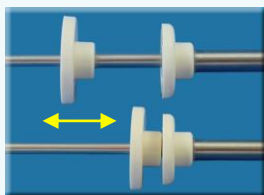

## Facile, sanitaire et économique

- ◆ Les seringues de transfert (en acier inoxydable) sont très fines (diamètre 3,6 mm), mais très résistantes. **Vous les sentirez faciles à insérer.**
- ◆ Vous pouvez ouvrir et fermer les **orifices de sortie**. Fermez-les jusqu'à l'insertion de la seringue à une profondeur suffisante. Ensuite, ouvrez les orifices et poussez les embryons. **Cela évite une obstruction de l'orifice.**
- ◆ Les **manchons sanitaires** sont préinstallés aux seringues de transfert. Il suffit de les sortir ensemble et de commencer les opérations de transfert d'embryons.
- ◆ Pour rendre les opérations de transfert d'embryons **sanitaires, efficaces et simples**, nous avons décidé que les seringues de transfert seront **A USAGE UNIQUE**.
- ◆ Le coût d'une opération de transfert d'embryons est d'environ **\$9.00**. A la place, vous pouvez toujours utiliser une seringue de transfert neuve et parfaitement sanitaire. Et vous n'avez pas à laver, stériliser effectuer d'autres tâches pénibles.

## La préparation de "mo-No.1" est simple et flacile

- (1) Ouvrez un paquet de seringues de transfert par l'extrémité de bride, insérez le tube à embryons dans la seringue à partir de l'extrémité de la bride.  
(Il n'est pas nécessaire de sortir la seringue de l'emballage avant le début de l'opération de transfert).
- (2) En utilisant une baguette, adaptez le tube à embryons à l'extrémité de la seringue.
- (3) Retirez la baguette et insérez le piston. L'opération de transfert d'embryons peut commencer.
- (4) Retirez la seringue avec la manchon sanitaire, puis commencez l'opération de transfert.

