


pour un transfert en profondeur de l'embryon dans la corne utérine...

Cathéter de transfert d'embryon de vache **mo-No.4**

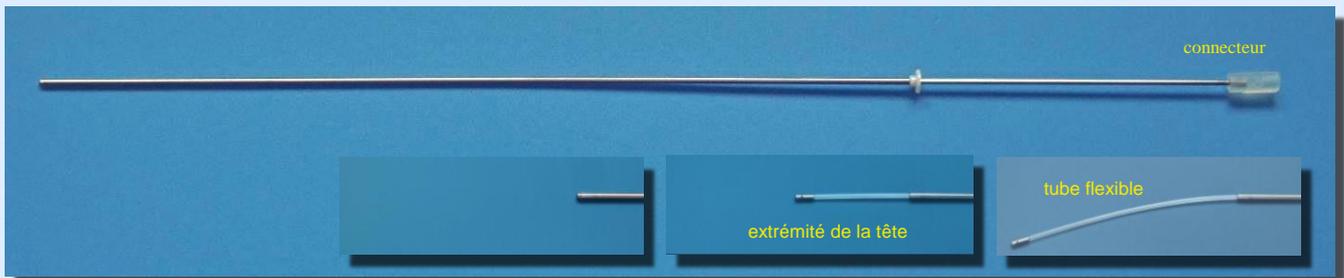


- Cathéter de transfert en profondeur d'embryon dans l'utérus
- Pour paillette de transfert d'embryon 0,25mL
- Emballage : individuel
- Paquet : 20 ensembles/boîte




「mo-No.4」 assure un transfert d'embryon avec succès à la partie profonde de l'utérus, est réalisé en collaboration avec le Centre japonais de transfert d'embryons ZEN-NOH.

- ◎ Insérez "mo-No.4" dans la corne de l'utérus et plongez le connecteur. Le tube en plastique flexible s'étendra dans la partie profonde de l'utérus pour libérer l'embryon.
- ◎ Un tube de protection pour éviter les impuretés est inclus dans l'ensemble, et "mo-No.4" est emballé individuellement. Il peut être retiré comme ensemble prêt à un usage unique.

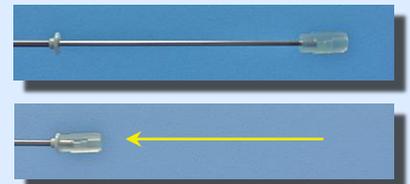

Comment utiliser 「mo-No.4」

- [1] Ouvrez l'emballage individuel à partir du connecteur et insérez le tube à embryons dans l'orifice du connecteur.
- [2] Avec une fine baguette, insérez l'embryon et le fluide du tube à embryons dans le tube à l'intérieur du cathéter. (Lors de cette action, la résistance décroît si l'on coupe le bouchon en deux, ce qui le rend plus facile à pousser.)
- [3] Gardez le cathéter en horizontal afin d'éviter la fuite de contenu, retirez la paillette et connectez une seringue (1mL ou 2 mL) au connecteur. (Le piston de la seringue doit être poussé jusqu'à ce point pour libérer le contenu.
ATTENTION : Si la seringue est déconnectée, le contenu se déverse.)
- [4] Avec le tube de protection toujours en place, retirez le cathéter du sac d'emballage et procédez au transfert.
- [5] Lorsque le bout de la tête est inséré dans la corne de l'utérus, poussez le connecteur pour étendre le bout de la tête. Une fois la profondeur souhaitée atteinte, poussez lentement le piston de la seringue (environ 4 à 5 secondes) pour libérer l'embryon.

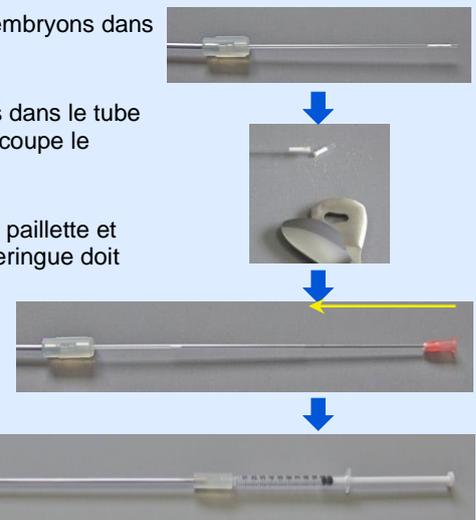

※Attention : Stocke dans un endroit frais et sec, à l'abri des hautes températures, de l'humidité et de la lumière directe du soleil. N'utilisez pas le paquet s'il est humide ou endommagé. **Cet article est à usage unique.**