




Inseminação Artificial e Transferência de Embriões de Vaca

Intra-uterine horn catheter

“mo-No.5”

O Lendário “Sistema Shimura”

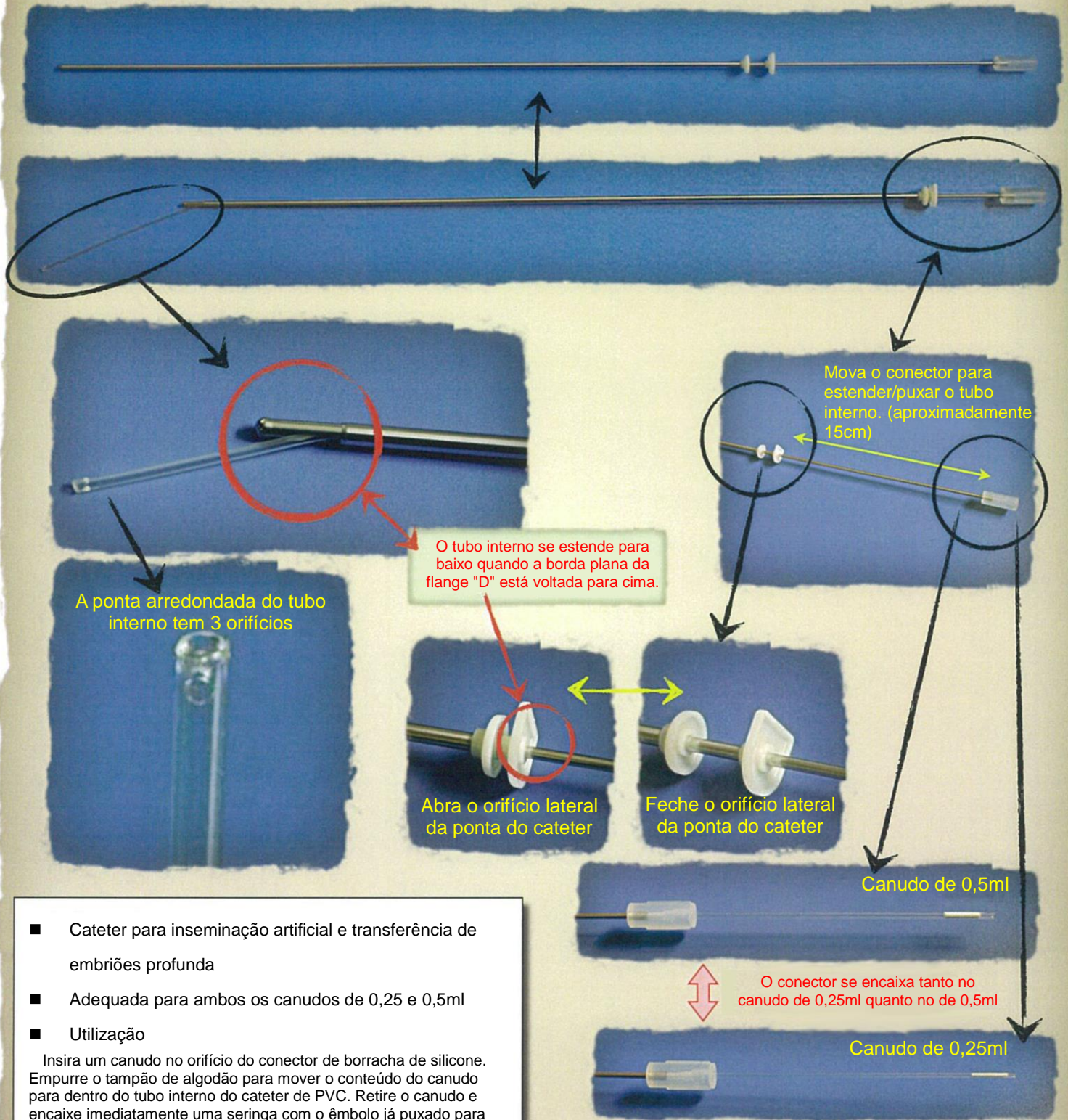

- Cateter para inseminação artificial e transferência de embriões profunda
- Adequada para ambos os canudos de 0,25 e 0,5ml
- Utilização

Insira um canudo no orifício do conector de borracha de silicone. Empurre o tampão de algodão para mover o conteúdo do canudo para dentro do tubo interno do cateter de PVC. Retire o canudo e encaixe imediatamente uma seringa com o êmbolo já puxado para trás no conector.

Então, continue com a operação de transferência. Quando a ponta do cateter alcançar o corno uterino empurre a flange "D" para abrir o orifício lateral da ponta do cateter, e em seguida empurre o conector para estender o tubo interno.

- Embalagem: embalados individualmente
- Embalagem: 20 conjuntos/ caixa

MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.

351, Asahi-machi Kasama-shi, Ibaraki-ken, 309-1717 Japan

Tel : +81-296-77-8804 Fax : +81-296-77-8849