




Insémination artificielle et transfert d'embryon pour vache

# Intra-uterine horn catheter

# “mo-No.5”

Le légende "Système Shimura"

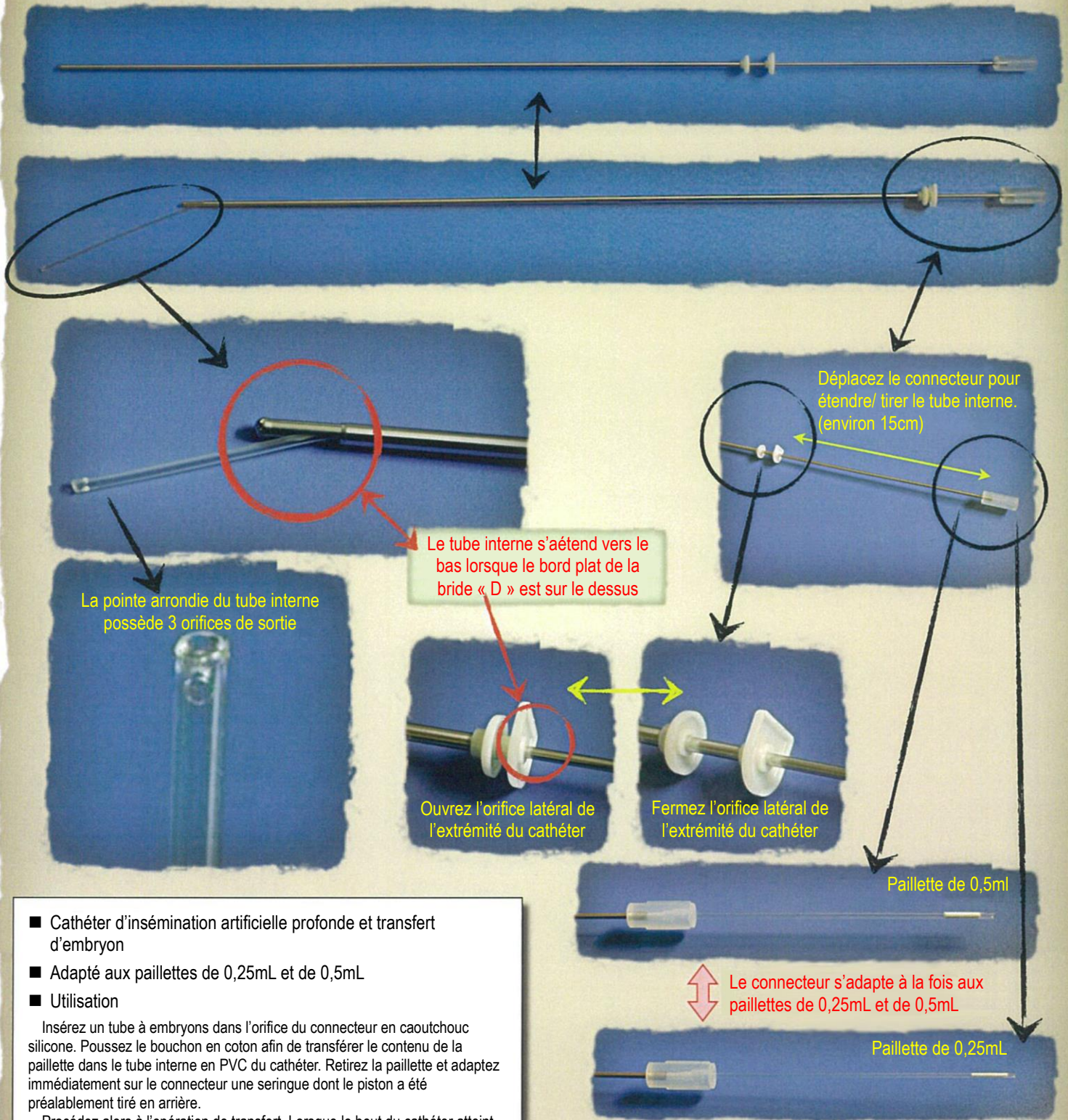

■ Cathéter d'insémination artificielle profonde et transfert d'embryon

■ Adapté aux paillettes de 0,25mL et de 0,5mL

■ Utilisation

Insérez un tube à embryons dans l'orifice du connecteur en caoutchouc silicone. Poussez le bouchon en coton afin de transférer le contenu de la paillette dans le tube interne en PVC du cathéter. Retirez la paillette et adaptez immédiatement sur le connecteur une seringue dont le piston a été préalablement tiré en arrière.

Procédez alors à l'opération de transfert. Lorsque le bout du cathéter atteint la corne utérine, poussez la bride « D » pour ouvrir l'orifice latéral de l'extrémité du cathéter, et poussez plus loin le connecteur pour étendre le tube interne. Poussez ensuite le piston de la seringue pour libérer le contenu dans le tube interne.

■ Emballage : individual

■ Emballage : 20 ensembles / boîte

MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.

351, Asahi-machi Kasama-shi, Ibaraki-ken, 309-1717 Japan

Tel : +81-296-77-8804 Fax : +81-296-77-8849