

# OVA-9 Set




食肉処理場由来卵巣からの卵子の採取器具

<実用新案登録 3213756 号>

手元の押ボタンを押せば

卵子／卵胞液を吸引できます。楽です。

針→吸引チューブ→遠沈管 ……▶吸引ポンプ

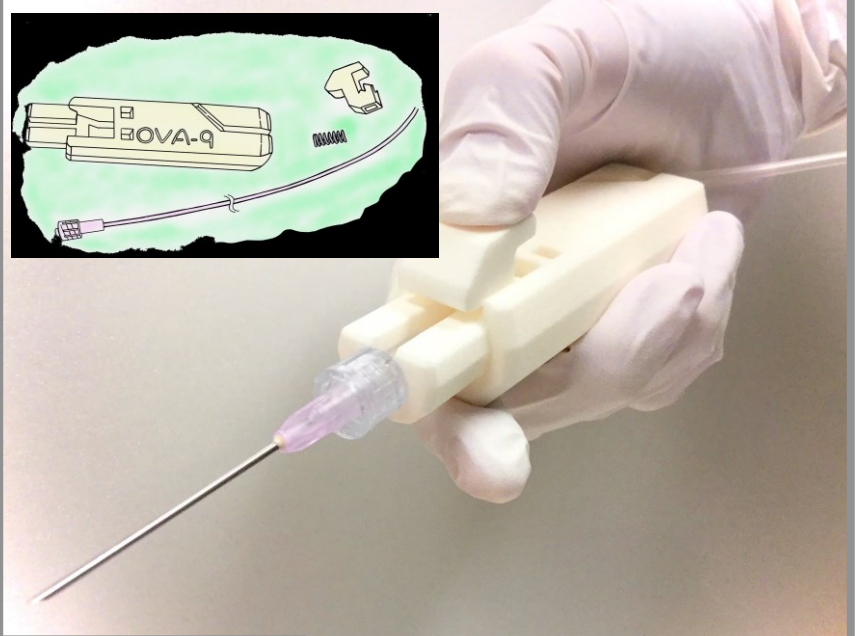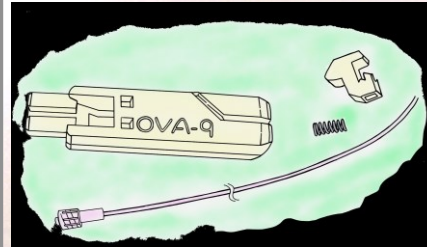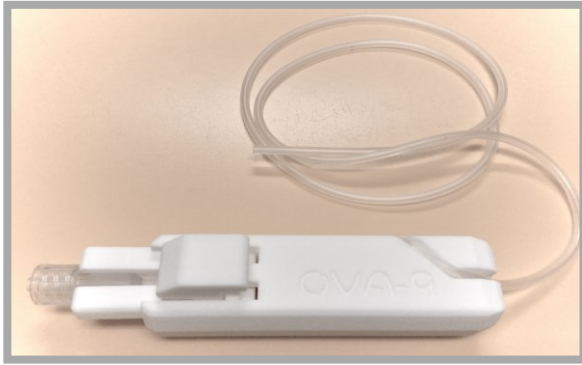


## <セット内容>

- ・本体 1個
- ・押ボタン 2個
- ・バネ 4個
- ・吸引チューブ 2本

## <価格>

- ・1セット 5,000円
- ・吸引チューブ 200円/本

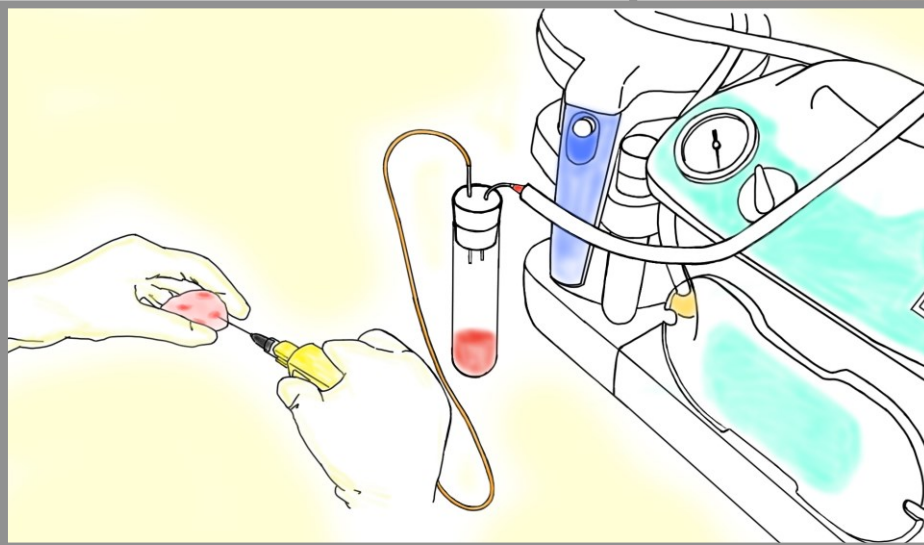

## <使用方法>

- ・押ボタン、バネ、本体を組立て、吸引チューブを通す
- ・吸引チューブのコネクタに針を取り付け、吸引チューブの逆の端部をシリコン栓／遠沈管につなげる
- ・シリコン栓とポンプとつなぎ、稼働
- ・チューブ内全体に卵子吸引液を満たしておく
- ・卵胞に針を刺し、押ボタンを押して吸引する

OVA-9は、食肉処理場由来卵巣からの卵子吸引作業を便利にするために開発しました。いままでの注射器を使った作業と比べ、穿刺して親指で押ボタンを押すだけの作業は、より簡単で負担も軽減されると思います。

オプション部品として、遠沈管接続用のシリコン栓（COVA ニードル用のものと同じ/950円）、吸引チューブ（殺菌済み）をご用意しております。また、押ボタンとバネにつきましても消耗部品として対応いたします。



シリコン栓



ミサワ医科工業株式会社

MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.

本社／営業 〒309-1717 茨城県笠間市旭町 351

Tel : 0296-77-8649 Fax : 0296-77-8849

E-mail : [information@misawa-medical.co.jp](mailto:information@misawa-medical.co.jp)