




# OVA-9 Set の 使用手順

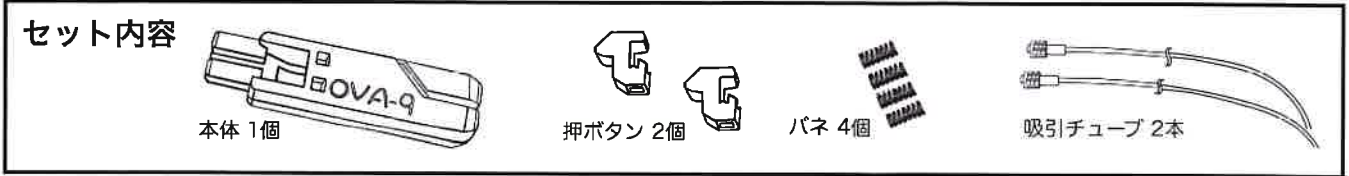

## ① OVA-9を組み立てる

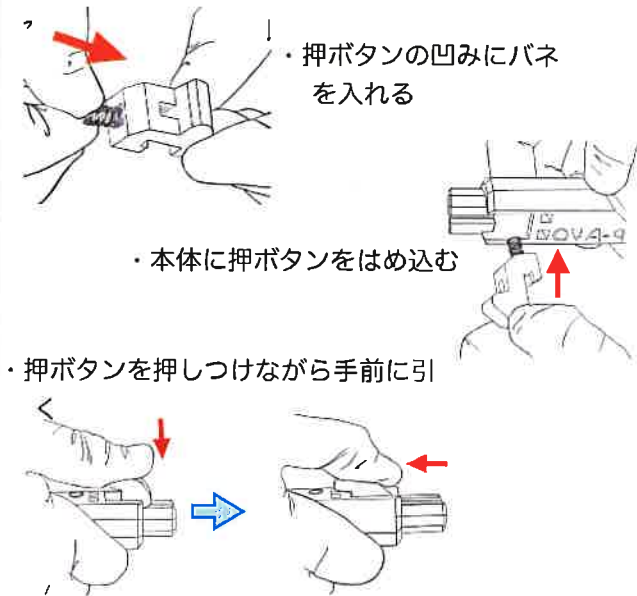


## ② 本体に吸引チューブ※を通す

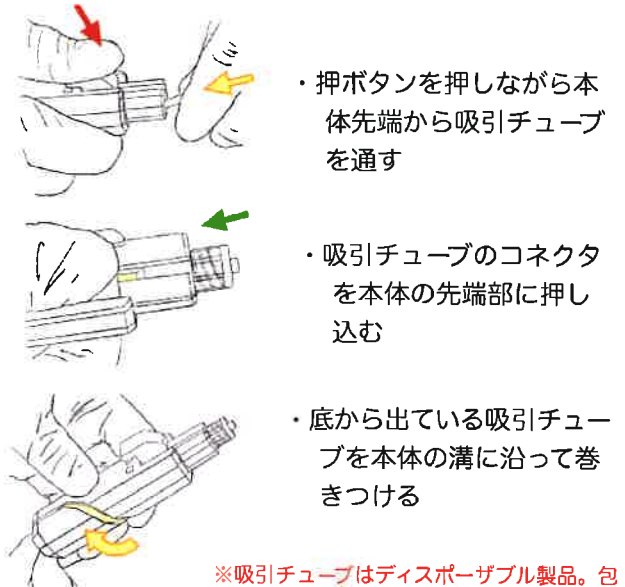

※吸引チューブは Disposable 製品。包装殺菌済み、開封後に一回のみの使用

## ③ 針をセットし、吸引チューブをシリコン栓にはめる

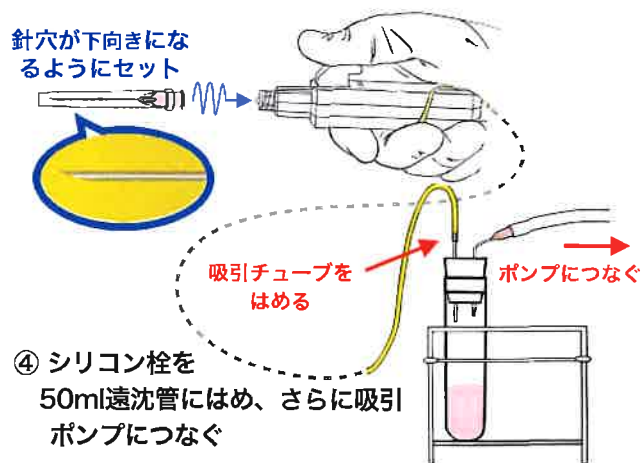


④ シリコン栓を 50ml 遠沈管にはめ、さらに吸引ポンプにつなぐ

⑤ ポンプの吸引圧をセットする

ポンプ吸引圧：100~120mmHG(=13.6~16.0kPa)

⑥ 卵子吸引液 (PBS等) を、吸引チューブ内を満たすまで吸引しておく

## ⑦ 卵子吸引を行う

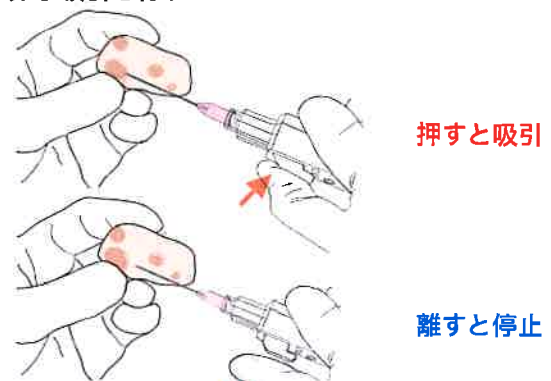

- ・ 針先を卵胞に刺したら押ボタンを押し
- ・ 針先が卵胞から出たら押ボタンを離す
- ・ 多量の空気を吸った場合は、卵子吸引液を再び吸引してチューブ内を満たす。

※ 卵丘細胞の裸化を防ぐため、吸引の際はなるべく空気を吸わないよう注意する

実用新案登録第3213756号

[注意] セットは組み立てたままでは、バネ弾性、部品の劣化が早まります。使用後は分解して、各部品を一緒に保管してください。長期の使用の後、部品の劣化で吸引が停止できなくなりましたら、まずバネを、次に押ボタンを交換してください。部品の追加購入はご相談ください。



ミサワ 医科工業株式会社

〒309-717 茨城県空間市旭町351

Tel : 0296-77-8649

Fax : 0296-77-8849